

Sirafan Speed

Přípravek pro rychlou dezinfekci ploch na bázi alkoholů

- mimořádně krátká doba působení
- určen k okamžitému použití
- bez obsahu aldehydů
- bez parfemace, mimořádně vhodný pro dezinfekci povrchů a přístrojů, které přicházejí do kontaktu s potravinami

Oblast použití: Pro všechny povrchy odolné vůči alkoholům.

Spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní, virucidní (omezené spektrum virů)
/Koncentrovaný přípravek - baktericidní účinnost dle EN 1276 – 30 s; fungicidní (kvasinky) dle EN 1650 – 30 s; baktericidní a fungicidní dle EN 13697 – 2 min.; DGHM – 5 min.; omezeně virucidní dle DVV/RKI – obalené viry – 30 s; Murine norovirus – 10 min./

Návod k použití:

Neředěný přípravek nastříkejte ze vzdálenosti asi 30 cm na dezinfikovanou plochu (40 ml/m²) a nechte zaschnout. Doba působení dle EN viz výše. Oplachování vodou není zapotřebí. Přípravek zasychá beze zbytků. Případné zbytky přípravku jsou z toxikologického hlediska nezávadné.

Nestříkejte na horké plochy či předměty. Elektrické přístroje vypojte ze zásuvky, příp. prověřte jejich ochranu vůči explozi.

Složení:

100 g kapaliny obsahuje: 35 g 2-propanolu, 25 g n-propanolu

Barva/skupenství: bezbarvá/kapalina

Vůně/zápach: po alkoholu

Bezpečnostní upozornění:

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Podrobné informace pro bezpečné nakládání s přípravkem viz bezpečnostní list.

Skladování: Skladujte v uzavřeném originálním obalu při teplotách do 25 °C.

Minimální trvanlivost: 2 roky od data výroby

Ekologicky testováno:

- výborně biologicky odbouratelný
- obal je z PE, lze jej snadno zcela vyprázdnit a recyklovat

Prodejní jednotka:

karton: 6 lahví à 750 ml + 3 rozprašovací pistolky

karton: 2 x 5 l